

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
салфетки влажной стерильной для ухода за веками
«Блефаросалфетка» по
ТУ 9398-021-76063983-2009

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Салфетка влажная стерильная для ухода за веками «Блефаросалфетка» по ТУ 9398-021-76063983-2009

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки века в условиях клиник, больниц, диагностических центров: для обработки поверхности кожи, краев век и ресниц после проведения физиотерапевтических процедур на глазах (электрофорез, фонофорез, магнитофорез); для профилактики блефаритов, конъюнктивитов и сухого глаза в офтальмологии.

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Салфетку влажную стерильную для ухода за веками «Блефаросалфетка» используют в качестве гигиенического средства для очищения кожи и краев век и ресниц и в качестве теплых компрессов на веки.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов раствора, пропитывающего салфетку влажную стерильную для ухода за веками «Блефаросалфетка», проявляющаяся в виде местных аллергических реакций.

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетка влажная стерильная для ухода за веками «Блефаросалфетка» представляет собой стерильный нетканый текстилеподобный материал, пропитанный специальным водным раствором и упакованный в водонепроницаемый стерильный пакетик. В состав пропитывающего раствора входит низкомолекулярный поливинилпирролидон, сорбирующие свойства которого обеспечивают размягчение засохших корочек (слизь, корочки, чешуйки), быстрое удаление их с поверхности ресниц и кожи, а также качественное очищение кожи век в послеоперационном периоде. Салфетка стерильна, по санитарно-химическим и токсикологическим показателям может использоваться как для обработки неповрежденной кожи, так и раневой поверхности, что позволяет применять ее для обработки кожи и краев век в послеоперационном периоде у пациентов, перенесших операции на глазах и веках, когда умывание водопроводной водой запрещено. Салфетка влажная стерильная для ухода за веками «Блефаросалфетка» упакована в герметичный непромокаемый пакет, что позволяет разогревать ее в горячей воде и после извлечения из пакета использовать в качестве разогревающих теплых компрессов на веки при дисфункции мейбомиевых желез.

Раствор, пропитывающий салфетку влажную стерильную для ухода за веками «Блефаросалфетку», не оказывает раздражающего действия на кожу и края век.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Салфетка состоит из нетканого текстилеподобного материала и пропитывающего состава, в соответствии с ТУ 9398-021-76063983-2009.
- Салфетка не имеет механических повреждений, складок, пятен, дырчатости. Пропитка салфетки равномерная.
- Размер салфетки (135±5)х(145±5) мм.
- Показатель pH водной вытяжки салфетки в пределах от 5,0 до 7,5 ед. pH.
- Масса саше с салфеткой (4,1±0,2) г.
- Масса пропитывающего состава в салфетке (2,4±0,2) г
- Влагуудержание (число стекающих капель) у салфетки не менее 1.
- Салфетка белого или желтоватого цвета.
- Салфетка стерильная. Стерилизация осуществлялась в потребительской таре радиационным способом, со стерилизующей дозой D_{ст}=15 кГр (1,5 Мрад) и максимально-допускаемой дозой D_{макс.}=40 кГр (4,0 Мрад) в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке.
- Потребительская тара с салфеткой в стерильном виде герметична.

7. СОСТАВ

Нетканый текстилеподобный материал, пропитывающий состав (вода очищенная, карбопол, поливинилпирролидон, экстракт ромашки, экстракт зеленого чая, экстракт гаммелиса, экстракт календулы, фенонип, гидроксид калия).

Салфетка не содержит лекарственных средств, биологических материалов, материалов животного и (или) человеческого происхождения.

8. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для очищения кожи, краев век и ресниц: чистыми руками извлекают салфетку из пакета, расправляют ее и мягкими движениями салфетки от внешнего угла к внутреннему углу глаза производят очищение нижнего и верхнего век. Очищение ресниц производят при закрытом глазе.

- Для проведения компрессов: пакет с салфеткой погружают в посуду с теплой водой. Спустя 3 минуты, достав его из воды, чистыми руками вскрывают пакет по метке разрыва, извлекают теплую салфетку и, не разворачивая, помещают ее на закрытые веки на 2–3 минуты. После этого, подушечками пальцев слегка надавить на края век (при закрытых веках) и несколько раз сильно зажмурить глаза. При надавливании на края век, равно как при зажмуривании глаз, расплавленный сальный секрет впрыскивается из протоков сальных желез век на поверхность. Один пакетик рассчитан для компресса-обработки одного глаза.

9. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Любой, кому показаны процедуры в соответствии с назначением салфетки.

10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Запрещается применение медицинского изделия после истечения его срока годности.

Запрещается применение медицинского изделия при повреждении первичной упаковки.

Изделие одноразового применения.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий (срок годности, материалы изготовления, габаритные размеры) при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности – 3 года с даты изготовления.

Изготовитель не несет ответственность за использование изделия не по назначению, не соблюдение инструкции по применению.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С.

13. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Салфетка транспортируется всеми видами крытых транспортных средств при температуре от -40 °С до +40 °С.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы салфетки, а также упаковка салфетки относятся к отходам класса А и должны утилизироваться как твердые коммунальные отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Претензии, связанные с применением салфетки влажной стерильной для ухода за веками «Блефаросалфетка» по ТУ 9398-021-76063983-2009, принимает производитель (изготовитель):

ООО «Гельтек-Медика», 115201, Россия, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 8

Тел.: +7 (495) 212-93-66

E-mail: info@geltek.ru